


SCHMERZLINDERUNG BEI HALLUX MIT VALGO SOCKEN

Bei den Valgo Socken handelt es sich um eine technologisch innovative Hallux Socke, welche den Fuss stabilisieren und ihn bei seinen physiologischen Funktionen unterstützen. Personen, die unter einem Hallux Valgus leiden oder dabei sind, einen solchen zu entwickeln schätzen die sanfte Dehnung der Führungshilfe zur Korrigierung der Fehlstellung der Grosszehe.

Valgo Hallux Socken korrigieren die Fehlstellung der Grosszehe auf praktische Weise und entlasten den Mittelfuss. Die Zehen (1) des Mittelfussbereiches werden separat geführt. Die unterschiedliche Verarbeitung der Fasern und Garne wirken bei Bewegung im Einklang mit dem Fuss. Dabei wird der Fuss (2) massiert und die Mikrozirkulation angeregt. Die Kraftlinien der Socke treten der krankhaften Winkelneigung der grossen Zehe entgegen. Damit wird durch eine sanfte Dehnung die Fehlstellung korrigiert.

Gleichzeitig bietet die Hallux Socke einen perfekten Halt und Entlastung für den Mittelfuss. Der Mittelfussknochen (3) wird stabilisiert und bei seinen physiologischen Funktionen unterstützt. Valgo Hallux Socken passen sich jeder Fussform (4) und Abrollbewegung an. Der Winkelbereich der grossen Zehe ist grosszügig bemessen, so dass die Zehe mehr Platz zum Bewegen hat.

Was sind die Vorteile der Valgo Hallux-Socke gegenüber anderen Therapieformen?

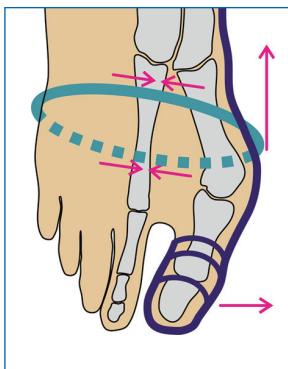

Tragekomfort:

passt in jeden Schuh und beugt Entzündungen vor

Aktive Wirkung:

der Fuss wird massiert und die Mikrozirkulation angeregt

Dynamik:

Zugkräfte wirken auf den grossen Zehen und die Fussmuskulatur

Material/Zusammensetzung: 60% Baumwolle, 33% Polyamid und 7% Lycra (mit antibakterieller Sanitized Technik)

Erhältlich pro Paar in den Grössen: S/34–36, M/37–39, L/40–42, XL/43–45

Farben: weiss oder schwarz

Verkaufspreis: Fr. 44.80 pro Paar

Direkt erhältlich unter: Telefon 071 335 07 77

Gebrauchsanleitung und wichtige Hinweise:

Als Einstieg empfehlen wir eine Anwendung von etwa 2–3 Stunden täglich. Nach einer Gewöhnungszeit von ca. 3 Wochen können Sie die Socken den ganzen Tag tragen. Gegenanzeigen sind nicht bekannt. Im Falle einer starken Rötung oder anhaltenden Schmerzen sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt.



Medizin • Reha • Pflege

BERRO AG
Landhausstrasse 4
Postfach 30
9053 Teufen AR
Tel. 071 335 07 77
Fax 071 335 07 70
info@berro.ch
www.berro.ch